

GETINGE

GETINGE GROUP

GETINGE CLEAN
RENGÖRINGSMEDEL FÖR BÄSTA RESULTAT



Always with you

GETINGE CLEAN – SVARET PÅ DINA RENGÖRINGSPROBLEM

Vad betyder ordet "ren" för dig? Att den medicintekniska utrustningen är fri från föroreningar som blod, fett, gifter och skadliga mikroorganismer? Bra, men är du riktigt säker på att allting du diskar och desinficerar verkligen är rent även på den nivå som ögat inte ser? Att använda Getinge Clean ger en garanti som innebär att du inte behöver oroa dig längre.

Getinge är ett varumärke som över hela världen är känt för att erbjuda marknadens mest heltäckande sortiment av rengörings- och dekontamineringsprodukter. Vårt marknadsledande sortiment av rengöringsmedel sätter standarden för säkerhet och effektivitet inom sjukvård, läkemedelstillverkning och biotekniktillämpningar.



Getinges sortiment av rengöringsmedel har utvecklats, testats och verifierats i Getinges diskdesinfektorer och uppfyller SS ISO 15883-standarden och dess smutstester för rengöringseffektivitet av gods som förekommer inom sjukvården.



Getinge
Clean

Enzymatic Detergent

GET MAXIMUM PERFORMANCE



Getinge
Clean

Universal Detergent

GET MAXIMUM PERFORMANCE 5L



VAR KAN JAG ANVÄNDA GETINGE CLEAN?

Automatiserade diskdesinfektorer är programmerade att köra olika processer beroende på vilket gods som behandlas, vattnets kvalitet och vilken typ och grad av nedsmutsning det gäller. De flesta processerna består av försköljning, huvuddisk och sköljning, följt av desinfektion med värme. Getinge Clean kan användas optimalt i såväl försköljningen, med kallt vatten, som i huvuddisken.

Getinge Clean är en komplett och mångsidig serie rengöringsmedel som ger ett effektivt, miljövänligt, ekonomiskt och optimalt rengöringsresultat.

Dessutom kan Getinge erbjuda validering av dina processer i desinfektorn för att optimera doseringsnivån. Allt i enlighet med de krav som föreskrivs i SS EN ISO 15883.



RENGÖRINGS- OCH DESINFEKTIONSPROCESS FÖR SJUKVÅRDEN

STEG 2: Manuell blötläggning

Getinge Clean Enzymatic
Getinge Clean Universal

STEG 3: Ultraljud

Getinge Clean Universal
Getinge Clean Enzymatic

STEG 4: Automatiserad fördisk

Getinge Clean Enzymatic

STEG 5: Automatiserad huvuddisk

Getinge Clean Enzymatic
Getinge Clean Heavy Soil
Getinge Clean Universal

Steg 6: Automatiserad neutralisering


Getinge Clean Neutralizer

Steg 7: Automatiserad slutsköljning

Getinge Clean Lubricant
Getinge Clean Rinse Aid

STEG 1: Förbehandling

Getinge Clean Pre Treatment Foam

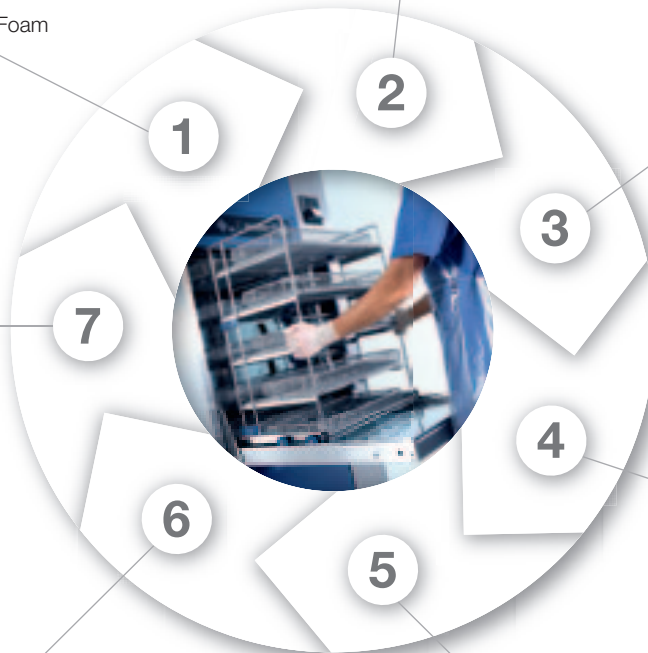

LÄTT ATT LÄRA SIG, ENKELT ATT ANVÄNDA

Produkterna i Getinge Clean-sortimentet är enkla att använda och symbolerna gör att det är lätt att lära sig var och när de ska användas. Du behöver inte längre oroa dig för att använda rätt produkt vid rätt tillfälle. Du kan lita på resultaten.

Användning:



INSTRUMENT

PASSAR FÖR INSTRUMENT OCH ALLA ANDRA
KOMPATIBLA MATERIAL



ALLT GODS

PASSAR ALLA ALLMÄNNA GODSTYPER



Produkttyp:



RENGÖRINGSMEDEL

RENGÖRINGSMEDEL



SKÖLJMEDEL

SKÖLJMEDEL



NEUTRALISERARE

NEUTRALISERARE



FÖRBEHANDLINGSMEDEL

FÖRBEHANDLINGSMEDEL



INSTRUMENT- SMÖRJMEDEL

INSTRUMENTSMÖRJMEDEL

När du väljer bland Getinge Clean-produkterna är det viktigt att alltid följa instrumenttillverkarens rekommendationer.

Getinge Clean Universal Detergent

Getinge Clean Universal Detergent är ett mildt alkaliskt rengöringsmedel med ytaktiva ämnen. Medlet är ett lågskummande och slipverkansfritt instrumentrengöringsmedel som snabbt avlägsnar, löser upp alla typer av föroreningar, liksom vattenmärken och oxidfläckar. Finns i förpackningar om 5, 10, 25 och 205 liter. Getinge Clean Universal Detergent har följande egenskaper:

- Utmärkt rengöringseffektivitet
- Rekommenderas i de fall då en avdelning vill begränsa antalet rengöringsmedel i bruk
- Passar alla typer av diskdesinfektorer
- Passar alla typer av material, för flexibla endoskop bör tillverkarens rekommendationer följas
- Neutralisering behövs inte



Getinge Clean Heavy Soil Detergent

Getinge Clean Heavy Soil Detergent är ett starkare alkaliskt rengöringsmedel som passar för alkalieresistenta material som instrument av rostfritt stål och glas. Passar inte för aluminium och eloxerad aluminium. Finns i förpackningar om 5, 10, 25 och 205 liter. Getinge Clean Heavy Soil Detergent har följande egenskaper:

- För kraftigt nedsmutsade föremål, till exempel gynekologi- och ortopediinstrument
- Effektivt för borttagning av blod, fett, olja och talg
- Effektivt på starkt bundna föroreningar, till exempel fastbrända elektrokirurgiska rester
- Passar alla typer av diskdesinfektorer
- Förhindrar återdeponering av proteiner



GETINGE CLEAN-SORTIMENTET I DETALJ

Getinge Clean Enzymatic

Getinge Clean Enzymatic är ett mildt, nästan pH-neutralt rengöringsmedel. Medlet kombinerar kraften i flerenzymrengöring med fördelarna hos maskindiskning, med en sammansättning som tar bort proteinbaserade substanser från instrumenten. Medlet kan användas i diskhoar och ultraljudsbad förutom i automatiserade diskdesinfektorer. Finns i förpackningar om 5, 10, 25 och 205 liter. Getinge Clean Enzymatic har följande egenskaper:

- Tränger in och bryter ned proteiner och organiska material
- pH-neutral
- Passar alla typer av diskdesinfektorer och manuell rengöring
- Passar alla typer av material, inklusive flexibla endoskop
- Effektivt i både hårt och mjukt vatten



Getinge Clean Neutralizer

Getinge Clean Neutralizer används på material som inte är syrakänsliga för att avlägsna syralösliga föroreningar, eller för att neutralisera alkaliska rester efter huvuddiskfasen. Finns i förpackningar om 5, 10, 25 och 205 liter. Getinge Clean Neutralizer har följande egenskaper:

- Baserad på en svag organisk syra
- Utan fosfater och ytaktiva ämnen
- Passar alla typer av diskdesinfektorer
- Kan användas med många typer av material



Getinge Clean Rinse Aid

Getinge Clean Rinse Aid är ett sköljmedel som används i slutsköljningen för att underlätta torkning. Finns i förpackningar om 5, 10, 25 och 205 liter. Getinge Clean Rinse Aid har följande egenskaper:

- Reducerar vattenfläckar och strimor
- Snabbar på torktiden
- Kompatibel med de flesta material
- Biologiskt nedbrytbart



Getinge Clean Pre Treatment Foam

Getinge Clean Pre Treatment Foam finns i 500 ml, och används huvudsakligen för förbehandling av instrument i rostfritt stål och andra verktyg efter användning innan de överförs till sterilavdelningen.

Produkten rekommenderas särskilt när det finns en fördröjning mellan att instrumentet används och att det dekontamineras. Getinge Clean Pre Treatment Foam är inte avsett att användas i maskin. Medlet har följande egenskaper:

- Förbättrar rengöringsprocessens effektivitet.
- Minskar uttorkning av förorenade ytor före dekontaminering
- Effektivt i rumstemperatur
- Fläckar inte glas, metall, plast eller utrustningen
- Ger en långtidsverkande fuktfilm som skapar en barriär mot kontaminering



GETINGE CLEAN-SORTIMENTET I DETALJ

Getinge Clean Instrument Lubricant

Getinge Clean Instrument Lubricant tillsätts i den avslutande sköljningen för smörjning av instrumenten. Den lågdoserande emulsionen ger en mycket tunn film av smörjmedel. Finns i förpackningar om 5, 10 och 25 liter. Getinge Clean Instrument Lubricant har följande egenskaper:

- Ser till att hakar, stift, förbindningar och boxlås fungerar ordentligt
- Förlänger instrumentets livslängd vid regelbunden användning, och minskar servicebehovet och reparationskostnader
- Härdas inte under sterilisation
- Biologiskt nedbrytbart
- Hindrar inte sterilisationsprocessen



GETINGES RENGÖRINGSMEDEL FÖR AUTOMATISERADE DISKDESINFEKTORER	KOMPATIBLA MATERIAL										STORLEK & FÖRPACKNING				
	Aluminium	Eloxerad aluminium	Titan	icke-järnhaltiga metaller	Mattkrompläterad	Rostfritt stål	Glas	Keramik	Hårdgummi	Plast	500 ml	5 liter	10 liter	25 liter	205 liter
■ GETINGE CLEAN HEAVY SOIL DETERGENT			M	●	●	●	●	●	M		4x5L	2x10L	1x25L	1x205L	
■ GETINGE CLEAN UNIVERSAL DETERGENT	M	M	M	M	●	●	●	●	M		4x5L	2x10L	1x25L	1x205L	
■ GETINGE CLEAN ENZYMATIC DETERGENT	●	●	●	●	●	●	●	●	M		4x5L	2x10L	1x25L	1x205L	
■ GETINGE CLEAN NEUTRALIZER	M	M	●	●	●	●	●	M	M		4x5L	2x10L	1x25L	1x205L	
■ GETINGE CLEAN RINSE AID	●	●	●	●	●	●	●	M	M		4x5L	2x10L	1x25L		
■ GETINGE CLEAN INSTRUMENT LUBRICANT	●	●	●	●	●						1x5L	1x10L	1x25L		
■ GETINGE CLEAN PRE TREATMENT FOAM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20x0.5L					

● = Kompatibel M = Se instruktioner från den medicintekniska utrustningens tillverkare.

Följ alltid tillverkarens rekommendationer om du använder flexibla endoskop.





JOBBA MED RENT SAMVETE

Ett grönt helhetsgrepp

Getinge Clean handlar inte bara om att rengöra instrument och cirkulationsgods. Det handlar också om att ha bättre kontroll över hur vi påverkar vår miljö. Alla våra rengöringsmedel är biologiskt nedbrytbara, och alla förpackningar går att återvinna.

Huvudfokus på energieffektivitet

På Getinge arbetar vi kontinuerligt med att bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi arbetar målmedvetet med att optimera vårt utnyttjande av energi och naturresurser, minimera våra utsläpp i luften och minska den miljöpåverkan som våra produkter innebär.

Ett viktigt miljömål är att optimera energiförbrukningen och på så sätt reducera inverkan på klimatet.



VI GER DIG HELA BILDEN

Kunskap om vattenkvaliteten

För att du ska få ut så mycket som möjligt av dina Getinge Clean-produkter och kunna hålla doseringsnivåerna nere, är det avgörande att du har en så bra vattenkvalitet som möjligt, i fysiskt, kemiskt och biologiskt avseende. Getinge kan erbjuda allt från testning av nyckelparametrar på plats till en fullständig analystjänst i laboratorium. Baserat på de här testernas utfall kan Getinge rekommendera de steg du behöver vidtag för att få så bra resultat som möjligt från din diskdesinfektor och dina rengöringsmedel, och därigenom öka produktionen utan att kostnaderna stiger, samtidigt som du genererar en mindre inverkan på miljön.

Tillbehör

I en modern sjukvårdsanläggning är tempot högt, och du måste kunna hantera och distribuera dina kemikalier effektivt. Getinge har ett brett sortiment av ergonomiskt utformade tillbehör som gör det lättare att använda Getinge Clean-produkterna så effektivt som möjligt.



Always with you

Getinge gör stora investeringar i forskning och utveckling av rengöringsmedel och utrustning, som syftar till att skapa världens bästa diskdesinfektionsprocesser. Fler än tusen Getinge Clean-specialister, tekniker och säljare hjälper våra kunder över hela världen att lösa sina rengöringsuppgifter.

ALL UTRUSTNING DU BEHÖVER – OCH ALLTING ANNAT OCKSÅ



Arkitektstøtt:

Getinge kan hjälpa dig med att planera och forma din anläggning - för ett optimalt arbetsflöde tillsammans med en expert på infektionskontroll.



Utrustning:

Ett komplett sortiment av spol- och diskdesinfektorer, autoklaver och systemtillbehör ger en komplett lösning för många typer av tillämpningar.



Service och støtt:

Getinges eget serviceteam ger fullständig installationservice, teknisk støtt, förebyggande underhåll och validering för maximal driftsäkerhet. Vårt nätverk med tekniker finns över hela världen.



Förbrukningsartiklar:

Vi kan erbjuda ett komplett och heltäckande utbud av förbrukningsartiklar som tillsammans med vår utrustning ger ett effektivt och kostnadseffektivt resultat.



Utbildning:

Getinge Academy erbjuder både tekniska serviceutbildningar och handhavande utbildningar för vårdpersonal. Detta kan ske antingen hos kunden eller på Getinges utbildningscenter.



Spårbarhet:

Getinges programvara T-DOC är ett avancerat och användarvänligt dokumentationssystem som ger full spårbarhet av instrument och resurshantering för vårdsektorn.



KOMPLETTA LÖSNINGAR FÖR INFEKTIONSKONTROLL

Getinge är världens ledande leverantör av lösningar för effektiv rengöring, desinfektion och sterilisation inom vård- och biovetenskapssektorerna. Vi fokuserar på att hjälpa våra kunder att erbjuda bättre vård till en lägre kostnad, genom att erbjuda genomtänkta och skräddarsydda lösningar. Det innebär att vi finns med våra kunder hela vägen från planering och utbildning till spårbarhet och support – med kompletta lösningar, långsiktigt engagemang och global närvaro. Getinge – Always with you.

Getinge Sverige AB

Box 69
305 05 Getinge
Telefon: 010 - 335 30 00
info@getinge.com

GETINGE

GETINGE GROUP

www.getinge.com

GETINGE GROUP är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning. Vi är verksamma under de tre varumärkena ArjoHuntleigh, GETINGE och MAQUET. **ArjoHuntleigh** fokuserar på lösningar för patienters mobilitet och sårvård. **GETINGE** tillhandahåller lösningar för infektionskontroll inom hälso- och sjukvård samt kontamineringsförebyggande verksamhet inom bioteknik. **MAQUET** är specialiserat på lösningar, behandlingar och produkter för kirurgi och intensivvård.